

# Insekten Stichheiler

## GEBRAUCHSANLEITUNG



### 1. ANWENDUNGSZWECK UND FUNKTIONSPRINZIP

Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler ist ein Medizinprodukt zur Linderung von Juckreiz und Schmerz verursacht durch Insektenstiche oder -bisse, wie beispielsweise durch:

- Mücken
- Bremsen
- Wespen
- Bienen

Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler funktioniert durch lokale Erwärmung der betroffenen Hautstelle auf ca. 50 °C für wenige Sekunden („lokale Hyperthermie“). Durch die Anwendung können Juckreiz und Schmerz schnell und langanhaltend gelindert werden. Die Behandlung ist sowohl unmittelbar nach dem Stich als auch bei späterem Auftreten von Symptomen möglich.

### 2. INBETRIEBNAHME

Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler funktioniert ausschließlich in Verbindung mit einem geeigneten Smartphone und der kostenlosen **heat it App**.

1. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie in Ihrem Appstore die **heat it App**.
2. Installieren Sie die **heat it App** (Version 2.5.0 oder neuer).
3. Stecken Sie den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler in den Ladeanschluss Ihres Smartphones.
4. Die App signalisiert Ihnen, dass der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler verwendet werden kann.
5. Sollten Fragen zur Inbetriebnahme auftreten, nutzen Sie die Hilfefunktion der App oder wenden Sie sich über [www.heatit.de](http://www.heatit.de) direkt an den Hersteller. Sehr umfangreiche Hilfefunktion und FAQ's finden Sie auch auf [www.heatit.de/pages/helpcenter](http://www.heatit.de/pages/helpcenter).

Den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler gibt es in zwei Varianten, bitte beachten Sie:

- Für die Benutzung der **Lightning-Variante** ist ein iPhone 6s bis 14 erforderlich.
- Für die Benutzung der **USB-C-Variante** ist ein Android Smartphone (Android 5.0 oder neuer) oder iPhone (15 oder neuer) erforderlich.
- Das Smartphone muss den OTG-Standard unterstützen. Bei manchen Smartphones muss OTG über die Einstellungen aktiviert werden (Oppo, OnePlus, Vivo).
- OTG-fähige Smartphones mit Micro-USB Anschluss können den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler mit einem OTG-fähigen Adapter mit CE-Kennzeichnung verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).



### 3. BEHANDLUNGSEINSTELLUNG

#### Behandlungsdauer:

Wählen Sie kurz, mittel oder lang (4 / 7 / 9 Sekunden)

#### Behandlungstemperatur:

Wählen Sie **Kind** (48,5°C) für Kinder und empfindliche Erwachsene und ansonsten **Erwachsener** (51,5°C).

Für **empfindliche Hautstellen** kann die Behandlungstemperatur um 1,5°C reduziert werden.

Um das Behandlungsprinzip kennen zu lernen, müssen bei Erstanwendung die Einstellungen **kurz**, **Kind** und **empfindliche Hautstelle** gewählt werden. Bei weiteren Anwendungen sind die Einstellungen nach persönlichem Empfinden zu wählen.

### 4. ANWENDUNG

Die App führt Sie durch die Anwendung des mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler:

1. Stecken Sie den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler in Ihr Smartphone. Die App öffnet sich und die LED am mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler leuchtet grün.
2. Im Menü die gewünschten Einstellungen wählen. Bitte **Abschnitt 3** beachten.
3. Den Startknopf oder eine Lautstärketaste drücken. Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler heizt nun einige Sekunden vor. **Den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler in dieser Zeit noch nicht auf die Haut drücken.**
4. Der Abschluss des Vorheizens wird über den Bildschirm signalisiert. Den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler zusammen mit dem Smartphone auf die betroffene Hautstelle drücken. Zum vorzeitigen Abbruch der Behandlung den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler von der Haut nehmen.
5. Das Ende der Behandlung wird über den Bildschirm mitgeteilt.
6. Bei Bedarf kann die Behandlung der gleichen Stelle nach einer Pause von **mindestens 2 Minuten** wiederholt werden.
7. Um das Gerät auszuschalten, muss es vom Smartphone getrennt werden.



### 5. HINWEISE

- Bienenstachel vor der Anwendung entfernen.
- Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler kann mit Unterstützung eines Erwachsenen bei Kindern ab 3 Jahren angewendet werden. Ab 12 Jahren ist eine eigenständige Anwendung möglich.
- Bei Unsicherheit und Erstanwendung müssen immer zunächst die Symbole **kurz**, **Kind** und **empfindliche Hautstelle** gewählt werden, um Hautreizungen zu vermeiden. Gleiches gilt für die Behandlung noch nicht erprobter Körperstellen.
- Eine Wartung des mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler ist nicht nötig, er sollte jedoch regelmäßig mit einem Desinfektionstuch gereinigt werden. Dazu den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler vom Smartphone trennen.
- Den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler nicht unter fließendem Wasser reinigen oder unter Wasser tauchen.
- Eine rot pulsierende LED zeigt an, dass der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler nicht korrekt mit der App verbunden ist. Bitte sicherstellen, dass die aktuelle Version der App installiert und die **Ladebuchse frei von Schmutz** ist.
- Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler ist ein medizinisch elektrisches Gerät, das zusammen mit dem Smartphone zu einem medizinisch elektrischen System wird.
- Das Gerät nur mit CE gekennzeichneten Smartphones und ggf. OTG-Adaptoren verbinden.
- Lagerhinweis: Bei längerer Nichtbenutzung das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und trocken lagern. Den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler unmittelbar nach der Anwendung vom Smartphone trennen, in die Schutzkappe stecken und separat lagern.

## 6. KONTRAINDIKATIONEN

- Das Gerät nicht auf bereits geschädigter Haut (z.B. bei Sonnenbrand) oder auf Wunden verwenden.
- Das Gerät nicht auf feuchte Hautstellen anwenden oder auf Hautstellen, auf die zuvor Salben, Cremes oder Gels aufgetragen wurden.
- Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler ist ausschließlich für die Verwendung auf der äußeren Haut konzipiert. Das Gerät nicht in Körperöffnungen, an Schleimhäuten, am Zahnfleisch, Nagelbett, an den Augen oder am äußeren Gehörgang anwenden.
- Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler darf nicht an besonders empfindlichen Hautregionen mit schlechter Durchblutung angewendet werden (bspw. bei schlechter Durchblutung der äußeren Extremitäten aufgrund von Diabetes, Varikose, Atherosklerose, Sklerodermie, Raynaud-Syndrom).
- Personen mit dauerhaft oder temporär reduzierter thermischer Empfindlichkeit der Haut (z.B. Polyneuropathie) dürfen das Gerät nicht benutzen.

## 7. NEBENWIRKUNGEN

- Die Anwendung kann als unangenehm empfunden werden.
- Die übermäßige Benutzung kann zu Hautverletzungen oder andauernder Verfärbung der Haut („kolorische Hyperpigmentation“) führen.
- Bei empfindlichen Personen kann eine kurzzeitige Hautrötung nach der Anwendung auftreten. In seltenen Fällen kann es zu Hautreizungen kommen.

## 8. WARNUNGEN

- Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler ist nicht geeignet, um allergische Reaktionen (anaphylaktische Reaktionen) zu behandeln. Wenden Sie sich bei Anzeichen unmittelbar an einen Arzt.
- Der mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler kann keine Krankheitsübertragung oder Krankheiten verhindern oder Symptome lindern, die nicht im Anwendungszweck aufgelistet sind. Bei Hinweisen auf eine übertragene Krankheit muss unbedingt ein Arzt konsultiert werden.
- Bei jeglichem Zweifel in Zusammenhang mit der Benutzung des Geräts muss ärztlicher Rat eingeholt werden.
- Dieselbe Hautstelle darf nicht öfter als fünfmal pro Stunde behandelt werden.
- Zwischen der wiederholten Behandlung derselben Hautstelle muss eine Pause von mindestens 2 Minuten eingehalten werden.
- Den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler niemals während des Aufheizvorgangs und niemals länger als 10 Sekunden auf die Haut drücken.
- Von Kindern fernhalten, Gefahr des Verschluckens von Kleinteilen.
- Bei ungewöhnlichem Verhalten den mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler nicht weiterverwenden und den Hersteller kontaktieren. Auftretende schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit dem mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler bitte zusätzlich der zuständigen Behörde in ihrem Land melden.
- Das Gerät nicht öffnen oder ändern und bei Beschädigung nicht weiterverwenden.
- Während der Verwendung des mosquito® by heat it Insekten-Stichheilers das Smartphone unter keinen Umständen laden. Bei Missachtung kann Kontakt mit gefährlicher Spannung nicht ausgeschlossen werden.

## 9. GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir, die WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG, gewähren Endkunden, die Verbraucher sind, für alle in Deutschland und Luxemburg gekauften mosquito® Stichheiler nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen freiwillig eine 2-Jahres-Garantie:

### Gegenstand und Umfang der Garantie

Die Garantie gilt für die mosquito® by heat it Insekten-Stichheiler, die in Deutschland und Luxemburg erworben wurden. WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG garantiert dem Erwerber, dass sein Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Tritt trotz sachgemäßer Behandlung des Produktes innerhalb der Garantiefrist von zwei Jahren ein Mangel auf, repariert WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG das Produkt kostenlos oder ersetzt dieses nach eigenem Ermessen vollständig (mit Ausnahme der Transportkosten zur Einsendung des Geräts).

### Ausschluss der Garantieleistung

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nicht bei Schäden, die auf Eigenverschulden des Erwerbers oder Dritter beruhen, wie z.B. Sturz oder unsachgemäße Handhabung. Gleiches gilt für Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind. Eine Garantieleistung durch WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn ein Mangel/Schaden auf eine unsachgemäße Reparatur oder sonstige Eingriffe durch Dritte zurückzuführen ist.

### Garantiefrist

Die Garantie gilt für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum (Garantiefrist). Maßgeblich ist das Datum des Kaufbelegs. Die Garantiefrist verlängert sich nicht aufgrund der Gewährung von Leistungen im Rahmen dieser Garantie, insbesondere nicht bei Instandsetzung oder Austausch des Produktes. Die Garantie beginnt in diesen Fällen auch nicht neu zu laufen.

### Geltendmachung von Garantieansprüchen

Die Rechte aus dieser Garantie kann der Erwerber durch Vorlage des mangelhaften Produktes und des Kaufbelegs innerhalb der Garantiefrist direkt gegenüber WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG oder dem Händler, bei dem der Kauf erfolgt ist, geltend machen. Liegt ein Garantiefall vor, repariert WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG das Produkt kostenlos oder ersetzt dieses nach eigenem Ermessen vollständig (mit Ausnahme der Transportkosten zur Einsendung des Geräts). Ergibt die Prüfung, dass kein Garantiefall vorliegt, kann das Produkt auf Kosten des Erwerbers durch WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG zurückgeschickt werden. WEPA übernimmt hierbei keine Transportkosten.

### Weitere Rechte des Erwerbers

Die Garantie gewährt WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG unter den genannten Bedingungen. Darüber hinaus können dem Erwerber weitere gesetzliche Rechte zustehen. Die vertraglichen und gesetzlichen Rechte des Erwerbers, insbesondere die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer des Produktes, lässt die Garantie unberührt. Die Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

## 10. ZEICHENERKLÄRUNG

	Zulässige Transport- und Lagertemperatur		Zulässige Betriebstemperatur
	Zulässige Luftfeuchtigkeit für Benutzung, Transport und Lagerung		Zulässiger Luftdruck für Benutzung, Transport und Lagerung
	Gebrauchsanweisung befolgen!	<b>IP42</b>	Gerät ist geschützt gegen das Eindringen von Tropfwasser und kleinen Fremdkörpern.
	max. 5.25 V, max. 500 mA (USB-C, heat it für Android) max. 4.2 V, max. 300 mA (Lightning, heat it für iPhone)	<b>LOT</b>	Charge (siehe Verpackung)
	Maximale Anwendungsdauer und Temperatur (Max. 10 s / 53°C)		Herstellungsdatum (in LOT-Nummer inbegriffen)
	Anwendungsteil ist Typ BF.		Die Umverpackung besteht aus Pappe. Bitte umweltgerecht entsorgen.
	Das Gerät hat eine voraussichtliche Betriebsdauer von 2 Jahren. Nicht über den Hausmüll entsorgen. Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik- Altgeräte Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft - WEEE an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott. Adressen und Öffnungszeiten der Sammelstellen erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Verwaltung.		<b>Hersteller:</b> Kamed GmbH Haid-und-Neu-Straße 7 76131 Karlsruhe service@heatit.de www.heatit.de/mosquito
	Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.		

Apple, iPhone and Lightning are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC. Design and specifications are subject to change without notice.