

# MEERWASSER NASENSPRAY SENSITIV+



- MEDIZINPRODUKT -

## GEBRAUCHSINFORMATION. BITTE SORGFÄLTIG LESEN!

**BITTE LESEN SIE FOLGENDE GEBRAUCHSINFORMATION AUFMERKSAM, WEIL SIE WICHTIGE INFORMATIONEN DARÜBER ENTHÄLT, WAS SIE BEI DER ANWENDUNG DIESES MEDIZINPRODUKTES BEACHTEN SOLLEN. WENDEN SIE SICH BEI FRAGEN BITTE AN IHREN ARZT ODER APOTHEKER.**

### ZWECKBESTIMMUNG:

Das Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ dient zur physikalischen Reinigung, Befeuchtung, Pflege und Regeneration der trockenen Nasenschleimhaut.

### ZUSAMMENSETZUNG:

#### Was ist in Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ enthalten?

1 ml Lösung enthält: 1 ml isotonische Lösung entsprechend einer 0,9 %-igen Natriumchloridlösung bestehend aus Meersalz-lösung, Dexpanthenol und Natriumhyaluronat (Natriumsalz der Hyaluronsäure).

### HINWEIS:

Ohne Konservierungsmittel.

### DARREICHUNGSFORM UND INHALT:

#### Was ist Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ und wofür wird es angewendet?

Dosierspray mit 20 ml Lösung zum Einsprühen in die Nase und Spülen der Nase.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

#### Wann wird Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ angewendet?

Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ wird angewendet:

- Zur Befeuchtung der Nasenschleimhaut bei trockener Luft sowie in geheizten und klimatisierten Räumen. Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ beugt der sogenannten „Trockenen Nase“ vor.
- Zur Reinigung der Nasenschleimhaut bei vermehrter Belastung mit Pollen und Hausstaub. Die Nase kann wieder atmen und das Reinigen der Nase z. B. durch Schnäuzen wird erleichtert.
- Zur unterstützenden Behandlung von Schnupfen und Heuschnupfen.
- Zur Lösung von Verkrustungen.
- Zur Pflege und Regeneration der sensiblen Nasenschleimhaut durch Dexpanthenol und dem extra Plus an Hyaluronsäure.

### GEGENANZEIGEN:

#### Wann dürfen Sie Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ nicht anwenden?

Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch/ überempfindlich gegen einen der unter „Zusammensetzung“ genannten Bestandteile dieses Medizinproduktes sind.

#### Darf Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, fragen Sie vor der Anwendung dieses Medizinproduktes Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

### VORSICHTSMASSNAHMEN UND BESONDERE HINWEISE:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Nach Nasenoperationen oder Unfällen sollte vor der Anwendung der Rat des Arztes eingeholt werden.

Vor der ersten Benutzung die Flasche mit der Öffnung nach oben halten und das Spraysystem mehrmals betätigen. Bei Austritt eines gleichmäßigen Sprühnebels ist das Produkt einsatzbereit. Die Flasche bei Benutzung möglichst senkrecht halten. Trotz des speziellen Spraysystems mit eingebautem Filter empfehlen wir aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen jede Dosiereinheit nur von einer Person zu benutzen. Nach der Anwendung empfiehlt es sich daher auch, den Nasenadapter abzuwaschen und trocken zu halten. Setzen Sie bitte nach der Anwendung die Verschlusskappe wieder auf das Behältnis.

Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion des Applikationssystems über die Anwendungsdauer zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

Eine eventuell verbleibende Restmenge ist technisch bedingt und in der Füllmenge berücksichtigt.

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren sollte nur unter Aufsicht Erwachsener stattfinden.

**WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN:**

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG:**

**Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ anwenden?**

Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene:

Je nach Bedarf mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße [0,14 ml je Sprühstoß] in jedes Nasenloch geben und dabei leicht durch die Nase einatmen. Bei gleichzeitiger Behandlung mit anderen Produkten im Nasenbereich sollten Sie Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ eine Stunde vorher anwenden.

**Wie lange sollten Sie Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ anwenden?**

Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Bei Bedarf kann Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden.

**WENN SIE EINE GRÖßERE MENGE VON MEERWASSER NASENSPRAY SENSITIV+ ANGEWENDET HABEN, ALS SIE SOLLTEN:**

Vergiftungen und Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

**WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Leichtes Brennen in der Nase kann nicht ausgeschlossen werden.

In einzelnen Fällen kann es zu einer Unverträglichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen von Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ kommen.

Die Quantifizierung der Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

**MELDUNG VON NEBENWIRKUNGEN/ SCHWERWIEGENDEN VORKOMMISSEN:**

Wenn Sie Nebenwirkungen oder eine im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt stehende Verschlechterung des Gesundheitszustands bemerken, wenden Sie sich an die unter „Hersteller“ angegebene Adresse. Dies gilt auch für Nebenwirkungen/ Schwere Vorkommnisse, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinproduktes zur Verfügung gestellt werden.

**HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT DES MEDIZINPRODUKTES:**

Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ darf nur bis zu dem auf dem Etikett und der Faltschachtel mit  „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Nach Anbruch sollten Sie Meerwasser Nasenspray SENSITIV+ nicht länger als 6 Wochen verwenden.

Nicht über 25 °C und nicht unter 5 °C lagern.



**MEERWASSER NASENSPRAY + FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN!**



**DIE APOTHEKENMARKE**

Vertrieb durch:

WEPA Apothekenbedarf  
GmbH & Co KG, D-56204 Hillscheid  
T +49 (0)2624 107-361  
www.wepa-dieapothekenmarke.de



Hersteller:

Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG  
Industriestr. 6  
52457 Aldenhoven, Germany



**MD** Medizinprodukt

112346-001  
Stand der  
Information: Januar 2020

