

WEPA WARZENSTIFT

STIFT ZUR BEHANDLUNG VON WARZEN AN
HAND UND FUSS

WEPA Warzenstift enthält eine ätzende Substanz.



Lesen Sie diesen Beipackzettel vor der Anwendung sorgfältig durch.



Nur zur äußerlichen Anwendung. Außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahren.

Das Produkt darf nicht in Kontakt mit Augen und Mundschleimhäuten kommen und nicht eingenommen werden.

Anwendungsgebiet

Der WEPA Warzenstift dient zur Behandlung von Warzen an Händen und Füßen. Das Produkt ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Warzen

Warzen (lateinisch Verruca) sind lokal begrenzte Geschwulste der Haut, die von humanen Papillomaviren (HPV) hervorgerufen werden. Sie erscheinen einzeln oder in Gruppen. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, die meist an den Händen, Füßen, Ellbogen und Knien auftreten. Warzen sind ansteckend und verbreiten sich durch direkten Hautkontakt mit dem Virus.

WEPA Warzenstift

Der WEPA Warzenstift ist ein Medizinprodukt.

Die Packung enthält einen Behandlungsstift und diesen Beipackzettel.

Der WEPA Warzenstift enthält 3 ml Wirkstoff, ausreichend für etwa 220 Anwendungen. WEPA Warzenstift ist speziell für die äußerliche Anwendung direkt auf Warzen gedacht.

Der WEPA Warzenstift enthält ein Gel, das sofort von der Warze aufgenommen wird. Der Stift enthält einen keratolytischen Inhaltsstoff, also einen Wirkstoff, der das Gewebe örtlich begrenzt auflöst, so dass die Warzen abgetragen werden können.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Nur zur äußerlichen Anwendung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Produkt enthält eine ätzende Substanz mit starkem Geruch. Nicht einatmen.

- WEPA Warzenstift nicht zur Behandlung von Genitalwarzen oder im Gesicht verwenden.
- WEPA Warzenstift nicht anwenden, wenn Sie wissen, dass Sie äußerst empfindlich reagieren oder allergisch gegen die Inhaltsstoffe oder Bienenstiche oder Ameisenbisse sind.
- Beim Auftragen nicht auf die gesunde Haut rund um die Warze bringen.
- Den behandelten Bereich erst wieder der Sonne aussetzen, wenn die Haut ihr normales Aussehen wiedererlangt hat.
- WEPA Warzenstift nicht auf schmerzende oder blutende Warzen, auf gereizte, entzündete oder verletzte Haut oder Blasen auftragen. Warten Sie, bis sich Ihre Haut erholt hat.
- Das Produkt nicht auf Warzen mit Haaren, Muttermale, dunkle Pigmentflecken oder pigmentierter Haut auftragen. Bitte auch nicht anwenden, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es sich bei der Stelle auf Ihrer Haut um eine Warze handelt.
- Bei Anwendung des Präparats auf dünner oder empfindlicher Haut, bei Kindern und Diabetiker/innen ist besondere Vorsicht geboten.
- **Im Zweifelsfall weniger Flüssigkeit auftragen. Eine Überdosierung kann Nebenwirkungen wie Wunden, Blasenbildung, Entzündung, Absterben des Gewebes (Nekrose), Narbenbildung oder Verätzungen nach sich ziehen.**
- **Überschreiten Sie keinesfalls die empfohlene Zahl an Anwendungen.**
- Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn der behandelte Bereich rot und schmerzhaft wird oder sich entzündet.
- Zur mehrfachen Behandlung von Warzen an einer Person.  Darf nicht von mehreren Personen angewendet werden.
- Nicht zusammen mit anderen Warzenbehandlungen verwenden.
- Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet, wenn nicht vom Arzt verschrieben.

Inhaltsstoffe: Ameisensäure (85 %), Dimethylsulfid, Wasser, Caprylsäure, Blattextrakt von Origanum vulgare.
Angaben aktualisiert: 2020-02.



Wenn dieses Produkt versehentlich mit den Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommt, müssen Sie diese 15 Minuten lang mit viel Wasser spülen und danach einen Arzt aufsuchen.

Bei versehentlicher Einnahme: Kein Erbrechen herbeiführen. Mund mit Trinkwasser ausspülen und reichlich nachtrinken und danach einen Arzt aufsuchen.

Bei Einatmen: Reichlich Frischluftzufuhr und danach einen Arzt aufsuchen.

Anwendung von WEPA Warzenstift

Wir empfehlen, die Warze mindestens 5 Minuten lang in lauwarmem Wasser aufzuweichen, damit die Haut vor der Behandlung weicher wird. Wenn die Warze unter einer harten Hautschicht sitzt, schaben Sie die Oberfläche der Warze behutsam ab (z. B. mit einem Scherenblatt) und entfernen Sie die harte Haut vorsichtig. Bearbeiten Sie die Warze nicht mit einer Feile. Die Behandlung von Kindern muss von Erwachsenen vorgenommen werden.

- 1 Nehmen Sie die Kappe des WEPA Warzenstifts ab.
- 2 Massieren Sie die Warze vorsichtig mit der Spitze des Behandlungsstifts für maximal 20 Sekunden. Die Lösung dringt sofort ein. Achten Sie darauf, die ganze Warze mit dem Gel zu benetzen, und passen Sie auf, dass nichts auf die umliegende Haut gelangt. Verschließen Sie den Stift nach Gebrauch wieder fest.
- 3 Die Behandlung 3 Mal pro Woche mit jeweils einem Tag Abstand durchführen. Wenn die Warze nicht vollständig verschwunden ist, 2 weitere Tage pausieren, dann die Behandlung wiederholen. Die Behandlung kann bis zu 6 Mal wiederholt werden (entspricht einer Behandlungsdauer von bis zu 6 Wochen). **Überschreiten Sie nicht die Anzahl der empfohlenen Anwendungen.**

Wenn die Warze nach der Anzahl der maximal empfohlenen Anwendungen nicht abfällt oder die Behandlung beachtliche Beschwerden verursacht, sollte ein Arzt konsultiert werden.

Der WEPA Warzenstift entlässt eine kleine Menge einer farblosen Lösung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Spitze des Stifts ausgetrocknet ist, drücken Sie die Spitze des Stifts auf ein Stück Papier, um den Austritt der Behandlungsflüssigkeit zu prüfen.

Wenn Beschwerden oder Schmerzen auftreten, brechen Sie die Behandlung sofort ab. Wenn die Haut nach dem Auftragen brennt oder sticht oder wenn die Lösung/ das Gel auf gesunde Haut kommt, mit kaltem Wasser abspülen.

Mögliche Nebenwirkungen

Das Produkt ist so anzuwenden, wie in diesem Beipackzettel angegeben. Das Produkt nicht überdosieren, da dies zu Hautschädigungen führen kann! [Bitte beachten Sie die Ausführungen unter „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“]

In manchen Fällen tritt nach dem Auftragen 10 bis 15 Minuten lang ein leichtes Prickeln oder ein brennendes Gefühl auf. Wenn zeitweilige Nebenwirkungen aufgrund von Überdosierung auftreten, z. B. Stechen, Rötung, Schmerz oder Bluten, setzen Sie mit der Behandlung auf, bis sich die Haut wieder vollständig erholt hat.

Es sind keine Risiken für Schwangere und Stillende bekannt.

Schwerwiegende Vorkommnisse sind dem Hersteller und der jeweiligen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der/die Anwender/in und/oder Patient/in niedergelassen ist, zu melden.

Aufbewahrungshinweis

Bei Temperaturen von 2 bis 25 °C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und in der Originalverpackung und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums oder später als 6 Monate nach dem erstmaligen Öffnen des Stifts verwenden. Stift nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen.

Die geleerte Produktverpackung kann entsorgt werden.

Hersteller:
Umigrup Aps, Diplomvej
373, DK-2800 Lyngby, Denmark

WEPA
DIE APOTHEKENMARKE

Vertrieb durch:
WEPA Apothekenbedarf
GmbH & Co KG, D-52014 Hillscheid
T +49 (0)2624 107-361
www.wepa-dieapothekenmarke.de